


SYNOVIUM 40

2%

HIALURONATO DE SÓDIO
120mg/3 SERINGAS



**ALÍVIO DA DOR
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**

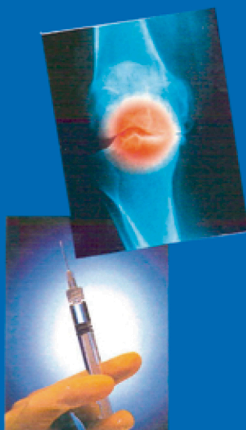

LCA
Pharmaceutical

TR FARMA
MEDICAMENTOS

VERDADEIRA ALTERNATIVA AOS ANTI-INFLAMATÓRIOS

■ DESCRIÇÃO

SYNOVIUM 40mg 2% é indicado para o tratamento sintomático da artrose por injeção intra-articular

SYNOVIUM 40mg 2% é um dispositivo viscoelástico implantável contendo um alto peso molecular derivado natural do ácido hialurônico - hialuronato de sódio, presente em alta concentração e obtido por engenharia genética.

SYNOVIUM 40mg 2% não contém proteínas de origem animal e não é quimicamente reticulado, eliminando assim quaisquer riscos de alergia e potencial citotoxicidade, garantindo perfeita tolerância e segurança.

■ FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

SYNOVIUM 40mg 2% é uma preparação estéril viscoelástica transparente, homogênea e não reticulada, composto de hialuronato de sódio altamente purificado derivado de fermentação bacteriana, contendo 40 mg de hialuronato de sódio por seringa de 2 ml.

SYNOVIUM 40mg 2% é fornecido em uma seringa luer lock de uso único.

A identificação do produto é indicada em uma etiqueta afixada na seringa.

A seringa é fornecida em embalagem estéril individual.

A embalagem possui uma etiqueta de identificação.

Agulha estéril para injeção intra-articular está inserida na embalagem.

Bula do produto também está inserida na embalagem.

■ COMPOSIÇÃO

Cada seringa de **SYNOVIUM 40mg 2%** contém:

Hialuronato de sódio FB	40 mg
Cloreto de sódio	18 mg
Água para injeção	02 ml

A esterilização é feita por autoclave a vapor.

■ INDICAÇÕES

SYNOVIUM 40mg 2% é indicado para reduzir a dor e restaurar a mobilidade articular substituindo e complementando a elastoviscosidade do líquido sinovial nas articulações artrósicas.

SYNOVIUM 40mg 2% é indicado para o tratamento sintomático da artrose através de injeção intra-articular

TRATAMENTO SINTOMÁTICO PARA OSTEOARTRITE DE JOELHO COM INJEÇÃO INTRA-ARTICULAR

■ INSTRUÇÕES DE USO :

- Verifique o prazo de validade e a integridade da embalagem individual de proteção estéril.
- Abra assepticamente a embalagem individual de proteção estéril.
- Remova a seringa e a agulha de injeção assepticamente.
- Enrosque a agulha de injeção no encaixe luer lock após remover a rolha sem tocar a ponta da seringa.
- Prossiga com a injeção intra-articular.
- A seringa e a agulha devem ser descartadas imediatamente após o uso em um local específico para descarte de resíduos.

■ POSOLOGIA:

3 injeções intra-articulares em intervalos de uma semana.

■ PRECAUÇÕES PARA USO :

As precauções de uso recomendadas são as seguintes:

- Antes de usar, verifique se a embalagem de proteção estéril do produto está intacta.
- Procedimentos assépticos devem ser seguidos em todo o processo.
- Não injetar outros produtos concomitantemente com **SYNOVIUM 40mg 2%**.
- Sempre aspire qualquer vazamento de líquido sinovial antes da injeção.
- Os cuidados de uso são os exigidos pelo protocolo de injeções intra-articulares. O profissional especialista permanece, no entanto, responsável por suas próprias técnicas e indicações.
- Siga cuidadosamente a posologia indicada neste folheto.
- Recomenda-se informar aos pacientes, como em qualquer uso de injeção intra-articular, que eles devem descansar por 24 horas e evitar qualquer atividade profissional e/ou esportiva.

Advertências: A seringa deve ser usada apenas uma vez. O conteúdo da seringa deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem estéril individual. A seringa deve ser descartada se não tiver utilizado todo o produto ou se a embalagem estéril individual tiver sido aberta.

Não esterilize o produto contido na seringa por aquecimento ou qualquer outro método. Tal ação é susceptível de levar à perda de propriedades físico-químicas e contaminação microbiológica do produto constituindo um risco grave de infecção e inflamação da articulação.

Não injete por via intravascular.

Não injete fora da cavidade articular ou no tecido sinovial, cápsula ou na presença de grande derrame.

SYNOVIUM 40 MG 2% não foi estudado em mulheres grávidas.

Não foi estabelecido que **SYNOVIUM 40 mg 2%** pode regenerar a cartilagem.

■ INCOMPATIBILIDADES:

Não use amônio quaternário (cloreto de benzalcônio) para desinfecção cutânea antes de usar SYNOVIUM 40mg 2 %

■ CONTRA-INDICAÇÕES:

Não administrar se o paciente apresentar hipersensibilidade conhecida ao hialuronato de sódio.

■ EFEITOS ADVERSOS:

SYNOVIUM 40 mg 2% é bem tolerado no homem. Dor leve e edema moderado podem às vezes ocorrer por 48 horas, casos em que é recomendada a aplicação de bolsa de gelo por algumas horas.

■ ARMAZENAGEM

SYNOVIUM 40 mg 2% deve ser usado imediatamente e deve ser descartado após o uso.

REGISTRO ANVISA N° 81504790059



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
TR FARMA MEDICAMENTOS
0800 941 5697
contato@trfarma.com.br